



Kiilto Pro Hydragel

Förbehandlingsmedel



Förbehandlingsmedel som förhindrar uttorkning och spridning av organisk smuts och sekret på ytan av instrument.

Användningsområde	Förbehandlingsmedel för situationer där instrument inte rengörs direkt efter användning. Medicinteknisk produkt. För professionellt bruk.								
Produktegenskaper	Den lättspredbara gelliknande sprayen bildar en hinna på instrumentens yta, vilket förhindrar uttorkning av organiskt material och sekret, vilket gör rengöringen lättare. Behandlade instrument bör rengöras inom 5 dagar. Lämplig för vanliga instrumentmaterial. Hydragel är vattenlösligt och rengör väl instrumentens yta.								
Bruksanvisning	Använd en förvarings-/transportlåda med lock. Spraya Hydragel på instrumenten som ligger i transportlådan. Normalt behöver instrumenten inte sköljas av innan användning av Hydragel, men om de varit i kontakt med natriumklorid eller vissa medel som används för att stoppa blödning inom gynekologi så bör instrumenten sköljas av först för att undvika korrosion. Iaktta trygga arbetsförhållanden under förvaring och transport av instrument. Tvätta instrumenten som vanligt inom 5 dagar.								
Obs	Under förbehandlingsmedlet får inga kemikalier lämnas kvar som kan fräta eller skada metaller. Tvätta bort stänk med vatten. Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.								
Sammansättning	Aktiva ämnen <table> <tr> <td>Nonjoniska ytaktiva medel</td> <td>< 5%</td> </tr> <tr> <td>Tvål</td> <td>< 5%</td> </tr> <tr> <td>Konserveringsmedel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Korrosionsinhibitor</td> <td></td> </tr> </table>	Nonjoniska ytaktiva medel	< 5%	Tvål	< 5%	Konserveringsmedel		Korrosionsinhibitor	
Nonjoniska ytaktiva medel	< 5%								
Tvål	< 5%								
Konserveringsmedel									
Korrosionsinhibitor									
pH koncentrat	9.0 svagt alkaliskt								
Förvaring	<28 °C. Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatumet.								
Utseende och doft	Oparfymrad, genomskinlig vätska.								
Tillverkningsland	FINLAND								

Användar- och miljösäkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Hydragel förbehandling gel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Produkten är biologiskt nedbrytbar. Råvarorna är miljövänliga. Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart material.

Förpackningsmaterial

Flaska: HDPE plast
Spraymunstycke: PP plast
Transportförp.: kartong/pappersförpackning

Förpackningsvolym / Artikelnr.

Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 750 ml	8222	6417964082227	6417964482959

**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.